

# Installation der App

## 1 Bluetooth® aktivieren

Gehen Sie in die Smartphone Einstellungen und aktivieren Sie Bluetooth.



## 2 Installieren Sie die Visit App



Laden Sie die **Bellman Visit** App aus dem App Store® oder von Google Play™ herunter und folgen Sie einfach den Anweisungen.



# Inbetriebnahme des Senders

## 3 Anbringen


Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klettverschluss auf der Rückseite des Senders und platzieren Sie ihn an der Wand. Ggf. Montage Set nutzen.

## 4 Aktivieren

Ziehen Sie die Batterieklappe heraus, um den Transceiver zu aktivieren. Die Status-LED am Visit Transceiver leuchtet grün auf, um anzuzeigen, dass er eingeschaltet ist.

## 5 Anschließen

Verbinden Sie das USB Kabel mit dem Netzteil. Stecken Sie anschließend das Netzteil in die Steckdose. Verbinden Sie zur Erkennung Ihres Festnetztelefons das mitgelieferte Kabel (ggf. mit TAE-Adapter) mit Ihrem Telefonanschluss/Router. Je nach Anschluss benötigen Sie evtl. einen Splitter.

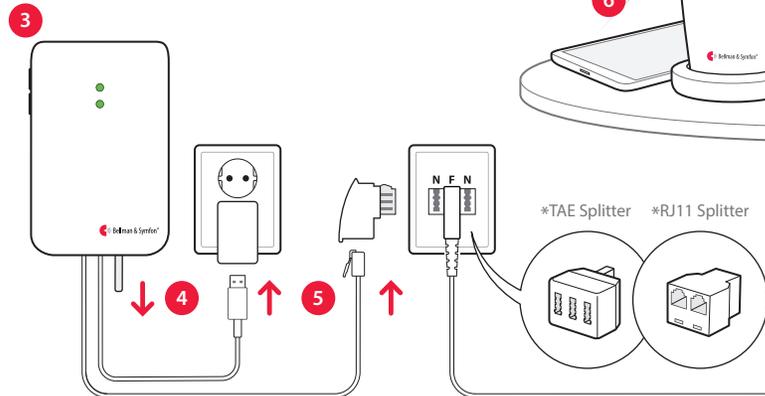


## 6 Smartphone-Anbindung testen

Bitte Sie jemanden auf Ihrem Smartphone anzurufen. Die gelbe LED an Ihrem Visit Empfänger beginnt zu blinken und er blitzt, vibriert und/oder gibt ein Tonsignal ab (je nach Empfänger).

## 7 Festnetz testen

Rufen Sie auf Ihrem Festnetzanschluss an. Die gelbe LED an Ihrem Visit Empfänger beginnt zu leuchten und er blitzt, vibriert und/oder gibt ein Tonsignal ab (je nach Empfänger).

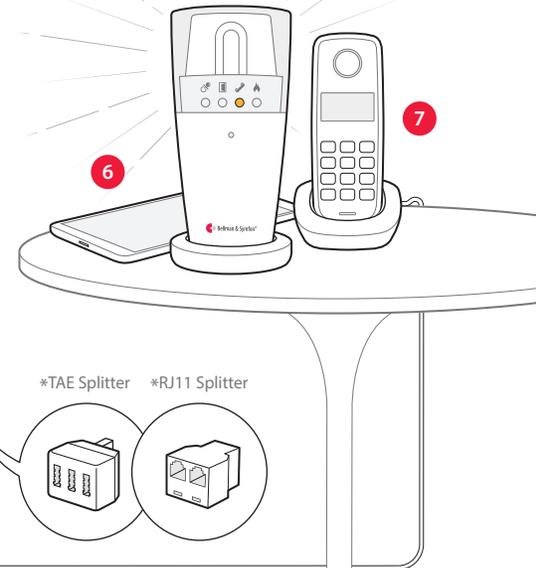

## Nutzung der App

Sobald Sie die Visit-App installiert haben, erhalten Sie Visit Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone. Darüber hinaus informieren die Visit Empfänger über Mobilanrufe und Mitteilungen. Sie können Ihr System ganz einfach in der App steuern.



### Mitteilungen verwalten

Mitteilungen mit nur einem Druck aktivieren, deaktivieren oder löschen.



### Steuerung Ihrer Geräte

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre angeschlossenen Geräte und tippen Sie auf +, um ein neues Gerät hinzuzufügen.



### Verlauf anzeigen

Rufen Sie die neusten Mitteilungen auf, sortiert nach Datum und Zeit.



### Mehr erfahren

Tippen Sie auf **Bedienungsanleitung** im Menü, um mehr über die Funktionen zu erfahren.



## Willkommen!

### Sie benötigen

- Ein Smartphone auf Basis von iOS 11 / Android 6 oder höher.

### Lieferumfang

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1 Telefon-Transceiver BT | 4 Schraube und Dübel |
| 2 USB - Netzteilkabel    | 5 TAE-Adapter        |
| 3 Telefonkabel           | 6 Netzteil           |

