


GPS-Track SeniorPro / Mini / WatchPro / Watch

Die Zahl der an Demenz erkrankten Menschen steigt beständig und schnell an. Die Betreuung von ganz oder teilweise orientierungslosen Personen wird zu einer immer größeren Herausforderung. Wir bieten Ihnen zuverlässige und leicht zu bedienende Ortungs-Lösungen an.

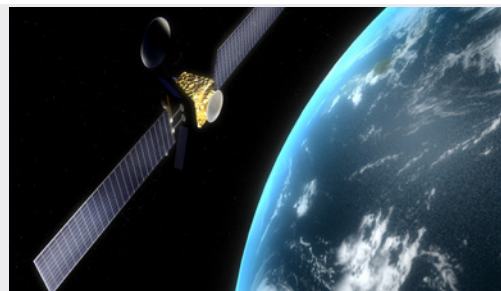

GPS-Ortungslösung für Senioren

Wir unterscheiden Lösungen für sicherheitsbewusste Senioren/chronisch kranke Menschen und Lösungen für demenziell erkrankte Personen.

Bei demenziell Erkrankten benötigen wir extrem robuste Lösungen, die im Hintergrund arbeiten und ohne Mithilfe des Trägers funktionieren. Hierfür haben wir den GPS-Track SeniorPro entwickelt.

Die weglaufgefährdete Person trägt den GPS-Track SeniorPro als Armband mit Patentverschluss um das Handgelenk, welches nur mit dem mitgelieferten Magnetschlüssel zu öffnen ist. Manche Nutzer tragen ihn auch am Fuß, unter dem Socken versteckt.

Alternativ bieten wir Ihnen den GPS-Track SeniorMini an, der an der Kleidung oder zum Beispiel an einem Rollator befestigt werden kann.

Für unsere aktiven Senioren und chronisch Kranke haben wir die GPS-Track Watch im Programm. Diese kleinen Notrufuhren sind schicker und filigraner als der SeniorPro, aber auch anspruchsvoller in der Anwendung.

Je nach persönlichem Bedarf, liefern wir Ihnen die richtige Lösung!



Alle GPS-Track Produkte ohne laufende Kosten.

Sie bekommen unsere GPS-Track Geräte betriebsfertig geliefert. Es entstehen unsererseits keine weiteren Kosten oder Gebühren. Die Kosten für die Nutzung unserer Apps und des Portals sind im Gerätepreis enthalten. Sie benötigen lediglich eine Handykarte mit Datentarif, die Sie bei uns oder auch bei Ihrem Mobilfunkhändler vor Ort buchen können.

Sie können sich die Position des GPS-Track auf einem internetfähigen PC, Laptop, Tablet-PC oder Smartphone anzeigen lassen.




Was ist GPS-Ortung?

Das Global Positioning System, das auch in Navigationssystemen von Fahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen genutzt wird, besteht aus mehreren Satelliten, die auf unterschiedlichen Bahnen um die Erde kreisen.

Je nach Ort und Zeit kann der GPS-Track die Funksignale von mehreren Satelliten gleichzeitig empfangen und daraus seine Position (Längen- und Breitengrad) sowie seine Geschwindigkeit und seinen Kurs bestimmen. Minimal müssen die Signale von 3 Satelliten empfangen werden. Der Mikroprozessor im GPS-Track verarbeitet und wandelt die GPS-Daten und sendet Sie per GSM Mobilfunk an unseren Server.

Der Prozessor im GPS-Track kann aber nicht nur Daten versenden, sondern auch vom Server empfangen. Dadurch kann z.B. eine aktuelle Ortsbestimmung oder eine Fernprogrammierung durchgeführt werden.

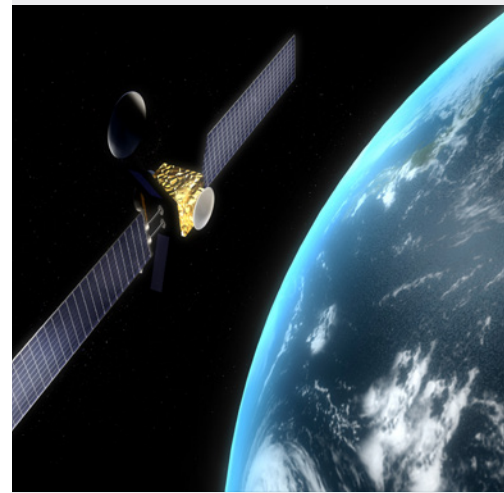

Voraussetzung für GPS-Ortung:

Grundsätzliche Bedingungen:

- **Sie müssen sicherstellen, dass der Akku im Gerät geladen ist.**
Wir empfehlen das Gerät nachts zu laden, damit Sie einen festen, alltagstauglichen Rhythmus haben.
- **Der Tracker muss getragen werden.**
Er muss fest mit der Kleidung /der Person verbunden sein. Die sicherste Lösung sind unsere GPS-Track-Pro Geräte mit dem patentierten Verschluss. Dieser kann nicht versehentlich geöffnet werden.
- **Der Tracker muss GPS-Empfang haben.**
Wie bei einer Auto-Navigation muss auch unser Tracker freie Sicht nach oben haben, um die Satelliten zu finden.
- **Der Tracker muss GSM-Empfang (Handynetz) haben.**
Die Positionsdaten werden per Handnetz an unseren Server übermittelt. Bitte wählen Sie ein Handnetz, welches auch im Einsatzgebiet des Trackers einen vernünftigen Empfang gewährleistet.
Tip: Unsere GPS-Track Allnet-Handykarten können sich in alle deutschen Handynetze einbuchen.

Sollten Sie diese vier Punkte nicht sicher stellen können, sind Sie ggf. mit einer Lösung, die die Tür überwacht besser beraten (siehe Dementenschutzsysteme bei uns im Shop).

Sie können unsere GPS-Track-Systeme auch mit unseren Raphael-home Systemen kombinieren. Wir beraten Sie gern, welche Lösung in Ihrem speziellen Fall und Umfeld die Beste ist.



Die Anwendungsarten von GPS-Ortung

Einfache Positionsbestimmung per Anruf (Polling)

Diese Variante ist heute technisch überholt, aber immer noch in aller Munde. Bei Polling „schläft“ das Gerät und wird erst durch einen Anruf oder eine SMS geweckt und sendet daraufhin seine Position. Theoretisch wäre diese Anwendungsart optimal wenn Sie spontan die Position der Person ermitteln wollen.

Polling empfehlen wir heute jedoch nicht mehr, da Sie keine Position bekommen, wenn der Tracker im Moment des Pollings keine Positionsdaten ermitteln kann (z. B.: Gerät im Gebäude, kein Handyempfang, etc.). Der Stromverbrauch ist zwar geringer als beim Dauersenden, dafür erhöht sich aber die Unsicherheit durch den Kaltstart. Zuverlässiger ist Dauersenden verbunden mit einem festen Ladezyklus, z.B.: jeden Abend.

Im Zeitalter der günstigen Datenflats ist der Handytarif auch keine Kaufentscheidung mehr für Polling.

Ablauf einer Ortung bei Polling:

Handykarte im GPS-Tracker anrufen, einmal klingeln lassen.

Position wird in App/Portal angezeigt. Details siehe unter: „Anzeigearten“

Polling ist bei der GPS-Track Watch nicht möglich.

Konstante Ortung: Dauersenden des Trackers alle 2 Minuten: Unsere Empfehlung!

Der GPS-Tracker sendet alle 2 Minuten automatisch seine Position (=Dauersenden). Wenn er 2 Minuten nicht bewegt wird, geht er in den Schlafmodus bis er wieder bewegt wird.

Diese Anwendungsart ist unsere Empfehlung. 95% aller unserer verkauften Geräte werden so eingesetzt. Im Zeitalter der günstigen Datenflats sollte man diese Anwendungsart wählen. Sie bietet die höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit. Sie können sich jederzeit ganz spontan die Position ansehen und auch im Nachhinein sehen, wo die zu betreuende Person lang gegangen ist.


Bitte verwenden Sie einen Tarif mit Datenflatrate (mindestens 50MB) für den Tracker. Wir empfehlen eine Vertragskarte. Details siehe unter: Was kostet GPS-Ortung/SIM-Karte.

Vorteil: Größtmögliche Sicherheit.

Sollte sich die zu betreuende Person mit dem Tracker in einem Gebäude befinden oder in ein Gewässer gefallen sein, bekommen Sie keine aktuelle Position (kein Empfang bzw. defekt). Da der Tracker in dieser Variante alle 2 Minuten seine Position an unseren Server gesendet hat, können Sie aber die Positionen bis zum Abbruch des Signals verfolgen. So sehen Sie z.B. in welches Gebäude die Person gegangen ist und können dort gezielt suchen.

Ablauf einer Ortung bei Dauersenden:

Der Tracker sendet automatisch alle 2 Minuten seine Position an unseren Server. Die letzte Position wird in App/Portal angezeigt. Details siehe unter: „Anzeigearten“

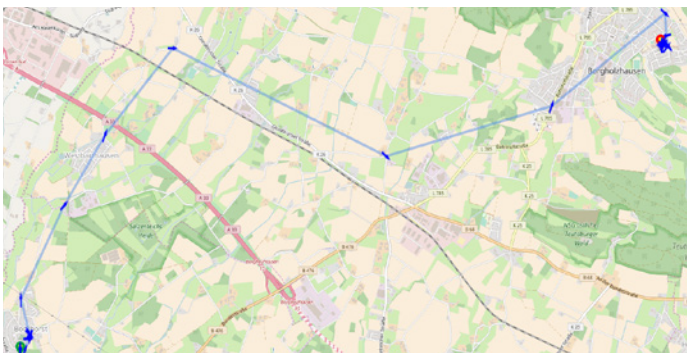

Wenn Sie vorherige Positionen/Laufwege sehen möchten:
Melden Sie sich in unserem Portal an und sehen sich dort den Verlauf der Positionsdaten an.

Detailansicht der zurückgelegten Strecke in GoogleEarth:

Hier sehen Sie den Verlauf einer Fahrt. Die Pfeile sind die Positionen alle 2 Minuten. Wenn Sie mehr Zwischenpositionen wünschen, können wir die Zeitintervalle kürzer stellen. Dann verringert sich aber die Akkulaufzeit des GPS-Trackers.

Geofence: Überwachung eines Gebietes per virtuellem Zaun (geofence)

Voraussetzung: Dauersenden des Trackers alle 2 Minuten

Sobald der GPS-Tracker einen vorher definierten Bereich (z.B.: 500m um das Haus) verlässt, bekommen Sie eine Meldung in Form einer E-Mail (kostenlos) oder einer SMS (0,19€ pro SMS).

Geofence ist eine kostenlose Zusatzfunktion. Sie müssen sich nicht im Vorfeld festlegen, ob Sie sie nutzen möchten. Es entstehen dadurch keine zusätzlichen Gebühren. Bei Bedarf können Sie diese Funktion einfach im Portal einrichten.



Ansicht Geofence im Portal: blauer Bereich=frei begehbare Zone | grüner Punkt=aktuelle Position des Trackers

Ablauf eines Trackingvorgangs bei Dauersenden und Geofence:

Der Tracker sendet automatisch alle 2 Minuten seine Position an unseren Server.

Im Vorfeld melden Sie sich in unserem kostenlosen Portal an. Dort setzen Sie den unsichtbaren Zaun (Geofence). Der Bereich innerhalb des Zaunes wird blau dargestellt.

Verlässt der Tracker diesen blauen Bereich bekommen Sie eine Nachricht mit „out“, betritt der Tracker anschließend wieder diesen Bereich kommt die Nachricht „in“. Bei Benachrichtigung per SMS fallen 0,19€ pro SMS an, die Meldung per E-Mail ist kostenlos. Sie können auch auf mehreren E-Mail Adressen gleichzeitig informiert werden.

Die letzte Position wird in App/Portal angezeigt. Details siehe unter: „Anzeigearten“

Streusignale bei Geofence

Es entstehen leider regelmäßig Fehlmeldungen bei Geofence, da die GPS-Geräte auch im Haus versuchen Ihre Position zu senden. Dort bekommen die Tracker zeitweise reflektierte Signale und senden dadurch falsche Positionen. Dieses Phänomen tritt bei allen Marken und GPS-Geräten auf, es ist prinzipbedingt.

Im Freien funktioniert die Ortsbestimmung zuverlässig, da die GPS-Signale direkt auf den Tracker fallen.

Am besten warten Sie im Alarmierungsfall die nächste Positionsmeldung (2 Min) ab und schauen erst dann nach der zu betreuenden Person. Zudem empfehlen wir beim Geofence den Radius möglichst groß zu machen.

Dieses Problem lässt sich aktuell nur lösen, wenn man den Tracker im Haus abschalten würde. Daran wird technisch gearbeitet. Einzelne, sehr aufwendige Profilösungen für Einrichtungen können das bereits. Hier muss aber jede Ausgangstür mit einer Elektronikbox versehen werden. Surftipp: Raphael GPS-Dual von der Martin Elektrotechnik in Bad Brückenau.

Notruf-Funktion incl. GPS-Ortung

GPS-Track Watch | GPS-Track WatchPro

Wir bieten Ihnen mit der GPS-Track Watch eine optisch unauffällige Lösung für das Handgelenk an. Im Gegensatz zu dem robusten GPS-Track SeniorPro für Menschen mit Demenz werden die GPS-Notrufuhren eher von aktiven Senioren, sicherheitsbewussten Personen, chronisch Kranken und zur Kinderortung eingesetzt.

Die GPS-Track Watch sendet alle 2 Minuten automatisch Ihre Position (Dauersenden). Wenn sie 2 Minuten nicht bewegt wird, geht sie in den Schlafmodus bis sie wieder bewegt wird. Sie können sich jederzeit die letzte Position ansehen und auch im Nachhinein sehen, wo der Träger lang gegangen ist.

Unsere Uhr ist zusätzlich auch in der Lage eine vorher programmierte Rufnummer anzuwählen. Sie können dann über die Uhr mit der Person telefonieren.

Die Uhr arbeitet mit einer eigenen SIM-Karte, wir empfehlen einen Handytarif (Voicetarif) mit Telefonmöglichkeit und Datenflat mit min 50MB. z.B. Congstar Smart für 10,- €/Monat (Stand 10-2016).

Einschränkung bei Menschen mit Demenz:

Bei demenziell Erkrankten nutzen wir die Notruf-Funktion nicht, da dieser Personenkreis erfahrungsgemäß mit der Bedienung überfordert ist und den Träger zusätzlich verunsichern würde.

Ablauf einer Ortung der GPS-Track Watch:

Die Uhr sendet automatisch alle 2 Minuten seine Position an unseren Server.
Die letzte Position wird in App/Portal angezeigt. Details siehe unter: „Anzeigearten“

Bedienung Notruffunktion:



Den SOS-Knopf kurz antippen, so dass die Uhrzeit auf dem Display zu sehen ist, danach etwa 10 Sekunden lang den SOS-Knopf betätigen, es erscheint „SOS“ und die gewählte Rufnummer im Display.

Nun wird die vorher programmierte Telefonnummer angerufen und eine SOS Meldung zum Server gesendet. Die Kontaktperson kann jetzt über die Uhr mit dem Uhrenträger telefonieren.

GPS-Track WatchPro incl. Patentverschluss

Wir bieten die Uhr auch als GPS-Track WatchPro mit einem Lederarmband mit Patentverschluss an, dieser schützt vor versehentlichem Ablegen der Uhr. Der Verschluss ist nur mit dem mitgelieferten Magnetschlüssel zu öffnen.

Besonderheit: Armband mit Patentverschluss | Magnetschlüssel öffnet

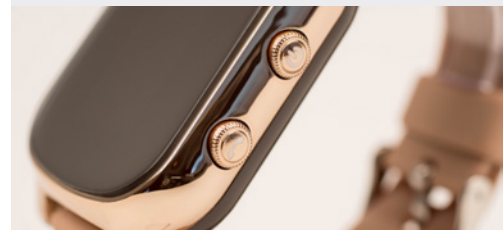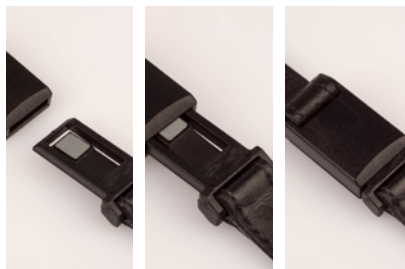

Anzeigearten

Wie sehen Sie die Position der Person bzw. des GPS-Trackers?

Sie bekommen den GPS-Track betriebsfertig von uns geliefert. Es entstehen unsererseits keine weitere Kosten oder Gebühren. Die Kosten für die Nutzung unserer Apps und des Portals sind im Gerätepreis enthalten. Sie benötigen für die Anzeige der Position ein, mit dem Internet verbundenes, Endgerät wie Smartphone, Tablet, PC, Laptop, etc..

Je nach verwendetem Gerät, haben Sie folgende Anzeigen:


1. Anzeige der Position auf internetfähigem PC/Laptop/Tablet im Portal.

Sie öffnen Ihren Internetbrowser und besuchen unser Tracking-Portal auf <http://ortung.weglaufstop.de> oder nutzen die LOG-In Funktion auf www.Weglaufstop.de.


Dort geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein. Diese Daten haben Sie von uns mit dem Gerät beim Kauf erhalten. Sie bekommen automatisch die letzte Position Ihres GPS-Tracks angezeigt:




- Anzeige der letzten Position

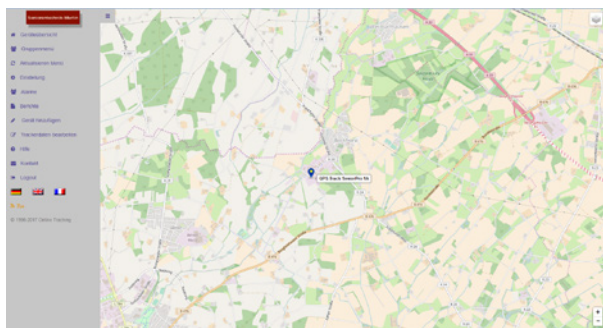


Anzeige im Portal, Typ: OSM Map, Karte zoombar

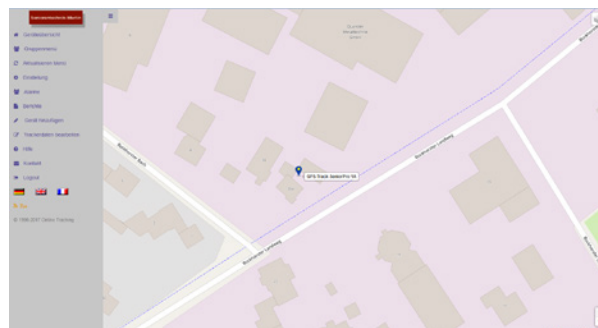


Anzeige im Portal, Typ: OSM Satellit, Karte zoombar

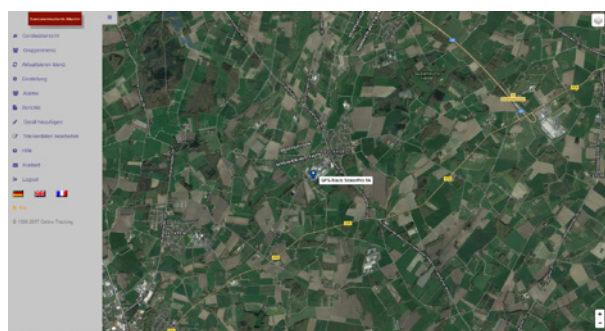

Anzeige im Portal, Typ: Google Satellit, Karte zoombar

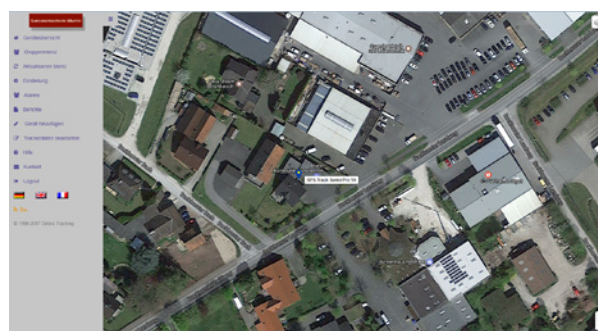


- **Anzeige Verlauf:** Sie können sich auch die zurückgelegte Strecke anzeigen lassen.

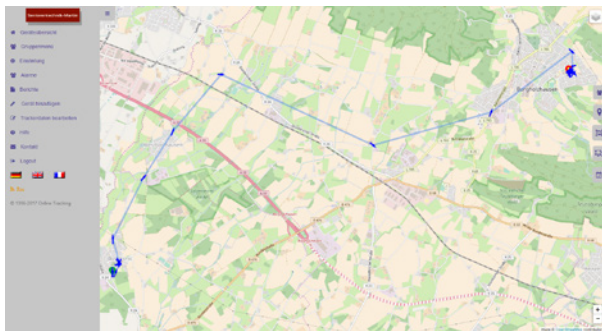

Hier sehen Sie den Verlauf einer Fahrt. Die Punkte sind die Positionen alle 2 Minuten. Wenn Sie mehr Zwischen-Positionen wünschen, können wir die Zeitintervalle kürzer stellen. Dann verringert sich aber die Akkulaufzeit des GPS-Trackers.


- **Anzeige Geofence:** Sie können sich Ihre geofence-Zonen anzeigen lassen.

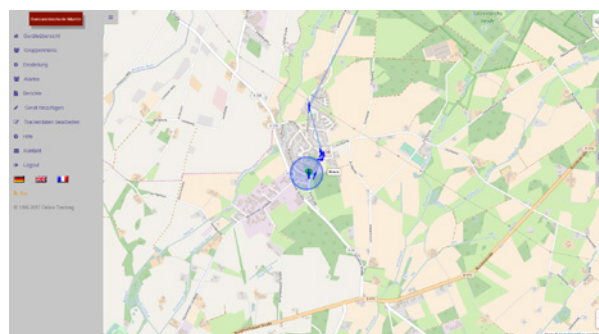

Anzeige im Portal, Typ: OSM Map, Karte zoombar



Anzeige im Portal, Typ: OSM Sat, Karte zoombar

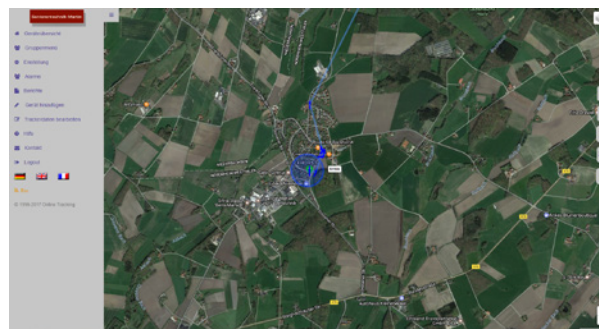


Anzeige im Portal, Typ: Google, Karte zoombar

2. Anzeige der Position auf internetfähigen Smartphones/ Tablets per App.



Anzeige der aktuellen Position auf dem internetfähigen Handy/Tablet per kostenloser App „Weglaufstop“, erhältlich für Geräte mit Android Betriebssystem, Windows10 oder iOS™ von Apple (iPhone/ iPad)




- **Android App“ Weglaufstop“** z.B.: Samsung, Sony, HTC, Huawei, Medion Smartphones mit Android Betriebssystem

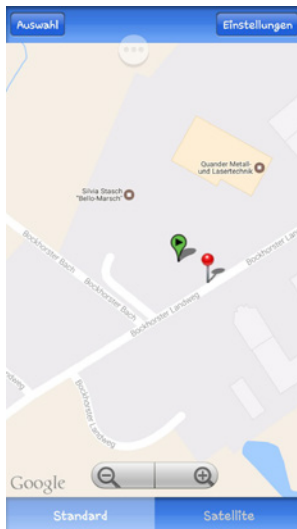

Kartenansicht - zoombar

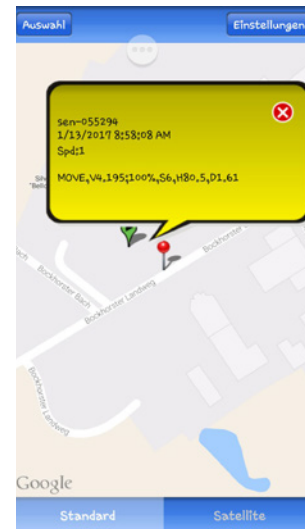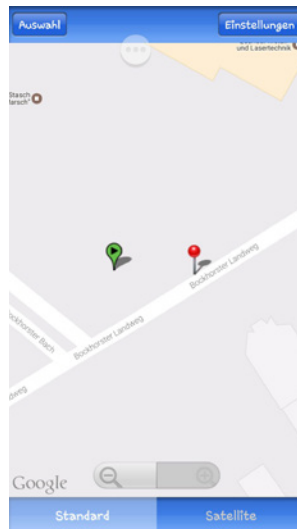


Satellitenansicht - zoombar



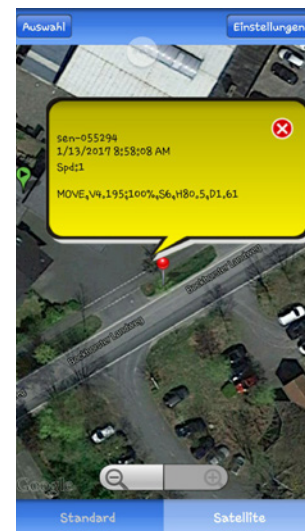


grüner Punkt: Standort Smartphone, **roter Punkt:** Standort GPS-Track, **Sprechblase:** Infobereich Status Tracker


- iOS App "Weglaufstop" für Apple Geräte

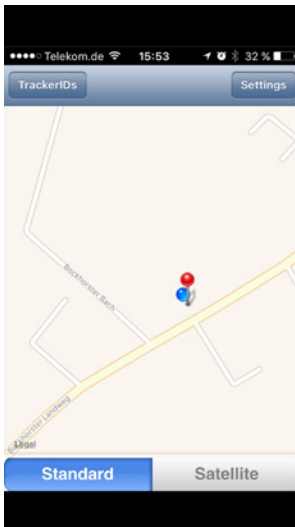

Kartenansicht - zoombar

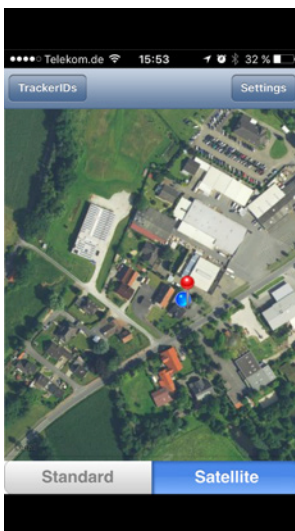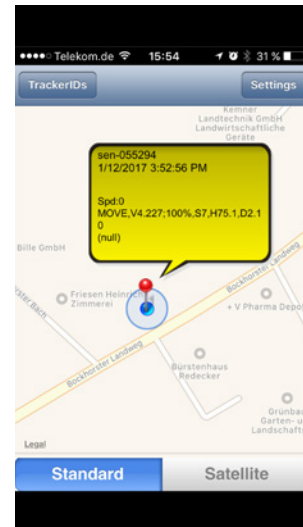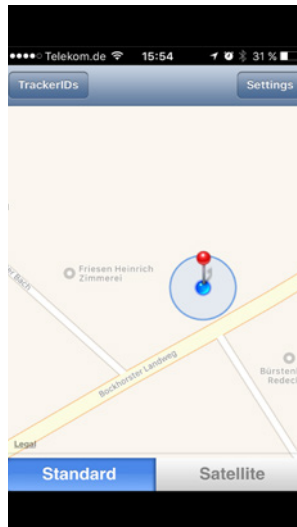

Satellitenansicht - zoombar

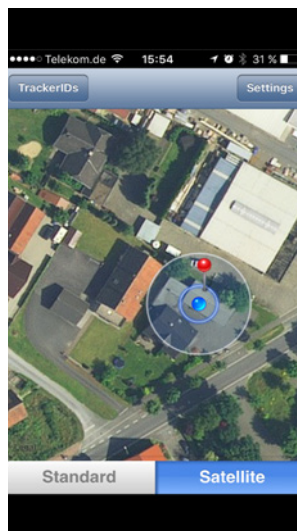


blauer Punkt: Standort Smartphone, roter Punkt: Standort GPS-Track , Sprechblase: Infobereich Status Tracker

3. Mitteilung der Position per SMS auf Telefon oder Handy (kostenpflichtig):

Nur als Alarmierung bei geofence!

Auf Wunsch versendet unser System die Alarmmeldungen vom geofence auf ein Handy oder per Sprachansage auf kompatible Festnetztelefone. Die SMS enthält die Position in Klartext, z.B.: geofence out Position: Bockhorster Landweg 30a, 33775 Versmold, + GPS Daten.

- 100 SMS kosten 19,-€ inkl. MwSt.
In der Seniorenortung werden aber selten 100 SMS über den kompletten Nutzungszeitraum verbraucht. Wir informieren Sie automatisch, sobald nur noch 5 SMS auf Ihrem Konto vorhanden sind.

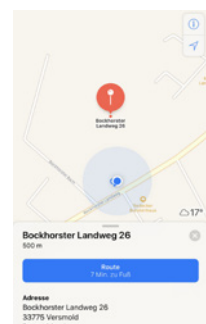

uhr-134770 Enter Kreis: 0.01
13.10.2017 17:10:46...Last seen at
Bogenstraße 2, [33775](#) Versmold,
Deutschland

uhr-134770 Exit Kreis: 0.48
13.10.2017 18:12:30...Last seen at
Bockhorster Landweg 26-28, 33775
Versmold, Deutschland

Welche Geräte benötigen Sie?

Neben dem GPS-Track Ortungsgerät (Tracker) benötigen Sie ein internetfähiges Endgerät (Smartphone/Tablet/PC/Laptop) zur Anzeige der Position. Details siehe unter „Anzeigearten“.

Sie bekommen Ihren GPS-Track betriebsfertig von uns geliefert. Es entstehen unsererseits keine weiteren Kosten oder Gebühren. Die Kosten für die Nutzung unserer Apps und des Portals sind im Gerätepreis unserer GPS-Track Geräte enthalten. Die Position des Gerätes kann in Echtzeit über verschiedene Anzeigearten abgerufen werden.

GPS-Track Mini1A

Kleiner mobiler GPS/GSM Tracker zur Positionsbestimmung von verwirrten Personen, Kindern und „Wegläufnern“. Der GPS-Track Mini ist ein GPS-Tracker in Kompaktversion, welcher sich auf die Senioren-Ortung fokussiert. Er ist seit Jahren im Einsatz und hat sich vielfach bewährt.


- Typische Anwendung: in Hand- oder Jackentaschen, am Rollator
- Robustes Gehäuse
- Spritzwassergeschützt nach IPX5.
- Bewährt: viele Geräte sind bereits jahrelang im Einsatz
- Für viele Sonderlösungen einsetzbar
- GSM: 850/ 900/ 1800/ 1900 Mhz
- Tarifempfehlung für benötigte GSM-Karte: Datenflat mit min 50MB

GPS-Track SeniorPro1A (GPS-Track Mini1A + Spezial-Armband)

Eines der Hauptprobleme bei der Ortung von Menschen mit Demenz ist sicherzustellen, dass das Gerät getragen wird. Wir verwenden beim GPS-Track SeniorPro ein Lederarmband mit Patentverschluss, welches nur mit dem mitgelieferten Magnetschlüssel zu öffnen ist. Im Armband arbeitet der GPS-Track Mini1A.

- Typische Anwendung: demenziell erkrankte Personen
- Armband mit Patentverschluss: nur mit Schlüssel zu öffnen
- Bandlänge kann verändert werden, an der Hand und am Fuß tragbar
- Sehr robust durch Ledertasche und Gehäuse
- Spritzwassergeschützt nach IPX5.
- Zum Aufladen des Akkus verbleibt der Tracker im Armband
- Tarifempfehlung für benötigte GSM-Karte: Datenflat mit min 50MB

Besonderheit: Armband mit Patentverschluss
Lässt sich nur mit Magnetschlüssel öffnen.

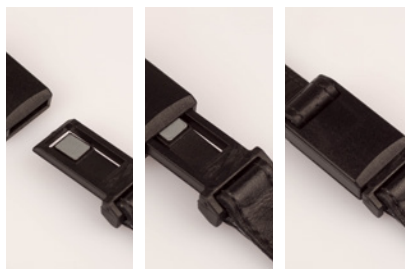

GPS-Track Watch

Moderne kleine Notruf-Uhr mit eingebautem GPS-Tracker zur Positionsbestimmung. Die GPS-Track Watch arbeitet mit einer GSM-/Handy SIM-Karte und ist somit ohne angekoppeltes Handy oder Smartphone einsatzfähig. Die GPS-Track Watch ist in der Lage auf Knopfdruck eine vorher programmierte Rufnummer anzuwählen.

Sie können dann über die Uhr mit der Kontaktperson telefonieren.

- Typische Anwendung: aktive Senioren, sicherheitsbewusste Personen, chronisch Kranke, Kinderortung
- Notruffunktion: wählt auf Knopfdruck die vorher programmierte Telefonnummer
- Lieferbar in den Farben: silber und gold,
- Kunststoffgehäuse mit Gummiarmband
- Tarifempfehlung GSM-Karte: Handytarif (Voicetarif) mit Telefonmöglichkeit und Datenflat min 50MB



GPS-Track WatchPro (GPS-Track Watch + Spezial-Armband)

Wir bieten die GPS-Track Watch auch als WatchPro mit einem Lederarmband mit Patentverschluss an, dieser schützt vor versehentlichem Ablegen der Uhr. Technisch ist die Uhr identisch mit der GPS-Track Watch.


Bei demenziell Erkrankten nutzen wir die Notruf-Funktion nicht, da dieser Personenkreis erfahrungsgemäß mit der Bedienung überfordert ist und den Träger zusätzlich verunsichern würde.

- Typische Anwendung: Zeitweise verwirrte Senioren mit Orientierungsschwäche
- Armband kann nicht versehentlich abgenommen werden
- Notruffunktion im Lieferzustand deaktiviert
- Lieferbar in den Farben silber und gold, Armband schwarz
- Kunststoffgehäuse mit Lederarmband und Patentverschluss
- Tarifempfehlung GSM-Karte für Uhr: Datenflat mit min 50MB

Besonderheit: Armband mit Patentverschluss.

Der Verschluss dieses Armbandes lässt sich nur mit dem Magnetschlüssel öffnen.

Das Armband wird an der Uhr mit normalen Uhrenbolzen gehalten. Wenn der Träger hier mit großem Kraftaufwand versucht das Armband abzunehmen, wird es ihm wahrscheinlich gelingen. Für Nutzer mit hohem Sabotagerisiko empfehlen wir den GPS-Track SeniorPro.

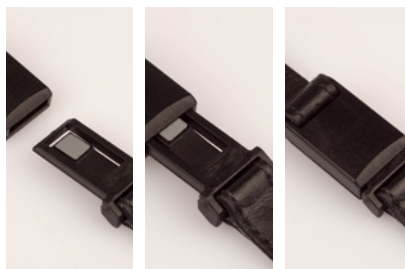

Geräteübersicht

Welcher GPS-Tracker für welchen Einsatzzweck ?

	GPS-Track Watch	GPS-Track WatchPro	GPS-Track Mini1A	GPS-Track SeniorPro1A	GPS-Track SeniorGürtel
					
Kundengruppe	• aktive Senioren • chronisch Kranke • Kinderortung • Personen mit hohem Sicherheitsbewusstsein • Mobiler Notruf	• Zeitweise verwirrte Senioren mit Orientierungsschwäche	• Sonderlösungen: Rollator, Einbau, etc.	• Menschen mit Demenz • Menschen mit Behinderungen	• Menschen mit Demenz, die einen Gürtel tragen
Patentverschluss	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein Colortag Spezialverschluss als Zubehör lieferbar
Notruf	Ja	Nein auf Wunsch möglich	Nein	Nein	Nein
Tragevarianten	Armband Gummi Armband Leder	Armband Leder	In Taschen (Pro1A/Gürtel/etc.) In Behältern	als Armband als Fußband	Auf dem vorhandenen Gürtel
Preise inkl. 19 % MwSt	349,00 €	449,00 €	379,00 €	479,00 €	449,00 €

Was kostet Senioren GPS-Ortung?

Die Gesamtkosten setzen sich zusammen aus den Anschaffungskosten für den GPS-Tracker und den Kosten der GSM-Karte für den Tracker.

Es entstehen unsererseits keine weiteren Kosten oder Gebühren. Die Kosten für die Nutzung unserer Apps und des Portals sind im Gerätepreis des GPS-Track enthalten.

Einmalige Kosten:

Das sind Anschaffungskosten für den GPS-Tracker und unter Umständen die Aktivierungsgebühr für die SIM-Karte. Zudem benötigen Sie ein internetfähiges Gerät mit dem Sie die Position des GPS-Trackers ansehen können. Das kann ein PC, Laptop, Handy, iPhone, iPad, Tablet-PC oder Smartphone sein. Details siehe: „Wie sehen Sie die Position der Person bzw. des GPS-Trackers“.

Laufende Kosten:

SIM-Karte

Der GPS-Tracker benötigt eine GSM-Karte um die Standortinformation an unseren Server zu senden. Wichtig ist, dass die Handykarte im Einsatzgebiet Empfang hat. Bitte überprüfen Sie das vor Buchung der entsprechenden Karte. Theoretisch reicht eine Prepaid-Lösung (Abtelefonier-Karte) völlig aus. Wichtig ist nur, dass Sie für ausreichend Guthaben sorgen und die Karte nicht wegen zu geringem Umsatz abgeschaltet wird (passiert häufig nach einem Jahr ohne aufgeladenem Guthaben). Eine Prepaid Datenoption (Flatrate) bekommen Sie zwischen 2,- und 10,- pro Monat, je nach Anbieter und Netz.

Wir empfehlen eine Vertragskarte. Hier ist die Karte ständig einsatzbereit, ohne dass Sie sich um etwas kümmern müssen. Die fälligen Beträge werden vom Konto eingezogen. Einen Datentarif bekommen Sie zwischen 2,- und 15,- pro Monat, je nach Anbieter und Netz.

Wenn Sie die Notruffunktion der GPS-Track Watch nutzen möchten, benötigen Sie einen Voicetarif mit Datenflat, umgangssprachlich „Handytarif mit Datenflat“ genannt. Z.B. Congstar Smart für 10,- € /Monat (Stand 10-2016).

GPS-Track Allnet M2M Datenkarten

Auf Nummer sicher gehen Sie mit einer GPS-Track Allnet Datenkarte. Diese ist für die jeweilige Laufzeit bezahlt und bucht sich in das vor Ort verfügbare Netz ein. Allnet bedeutet, dass diese Karte mit allen Netzen arbeitet: Telekom, Vodafone, O2 und E-Plus. Zudem haben wir viele Administrationsmöglichkeiten bei diesen Datenkarten und können Onlinestatus etc. einsehen.

Wir bieten Ihnen für unsere GPS-Track Geräte ohne Notruffunktion diese Datenkarten an:

- | | | |
|---|-------------|-------------------------------|
| • 12 Monate Laufzeit - Deutschland-Flat | für 99,95€ | (entspricht 8,33€ monatlich) |
| • 24 Monate Laufzeit - Deutschland-Flat | für 159,95€ | (entspricht 6,67€ monatlich) |
| • 12 Monate Laufzeit - Europa-Flat | für 119,95€ | (entspricht 10,- € monatlich) |
| • 24 Monate Laufzeit - Europa-Flat | für 199,95€ | (entspricht 8,33€ monatlich) |

Bei unseren Datenkarten fallen keine einmaligen Aktivierungskosten an.

Serverkosten / Alarmierungskosten

Es entstehen unsererseits keine weiteren Kosten oder Gebühren. Die Kosten für die Nutzung unserer Apps und des Portals sind im Gerätepreis des GPS-Track enthalten. Sie können sich so oft Sie mögen, die Position des Trackers im Portal/der App ansehen, dadurch entstehen keinerlei Kosten. Die Alarmierung bei geofence per E-Mail ist kostenlos, bei Benachrichtigung per SMS fallen 0,19€ pro SMS an.

Warum ein GPS-Track von Seniorentechnik-Martin?

- Unsere Geräte werden komplett programmiert und einsatzbereit geliefert!
Nach dem Kauf bekommen Sie von uns einen Fragebogen zugemailt. Anhand dessen wird Ihr Gerät bei uns im Hause programmiert und getestet. Wenn Sie eine SIM-Karte bei uns mit gekauft haben, ist diese sogar bereits eingelegt.
- Keine laufenden Kosten unsererseits!
- Kostenloses Online-Portal „ortung.weglaufstop.de“
- Kostenlose App „Weglaufstop“
- Alle unsere GPS-Track Geräte sind kompatibel mit unserer App und Portal. Wichtig bei mehreren Geräten!
- GPS-Track Pro Geräte mit patentiertem Verschluss – nicht versehentlich abnehmbar
- Server-Standort ist in Deutschland
- Inhabergeführtes Unternehmen aus Deutschland
- Persönlicher Service
- 24 Monate Gewährleistung
- Jahrelange Erfahrung im Bereich Seniorenortung

Professionelles Sortiment bei Seniorentechnik-Produkten

- Hausnotrufsysteme von Tunstall
- Personenrufsysteme von Tunstall, Bellman&Symfon
- Lichtsignalübertragungs-Systeme von Bellman&Symfon aus Schweden
- Dementenschutz-Systeme „raphael-home“ mit RFID-Armband
- Alarmtrittmatten-Systeme
- Wegläuferschutz-Systeme
- Alltagshilfen für Hörgeschädigte
- schnurlose, digitale Audio-Übertragungssysteme
- digitale Hörhilfen
- Wecker für Hörgeschädigte und Senioren



SYSCON | Martin
healthcare

SYSCON-Martin healthcare GmbH
Bockhorster Landweg 30a
33775 Versmold
Tel.: 05423-4734-0
info@seniorentechnik-martin.de
www.syscon-martin.de

Seniorentechnik-Martin.de

Dementenschutz
Lichtsignalanlagen
GPS-Ortung
Ruf-Systeme

