


Visit Babyruf-Sender

BE1491

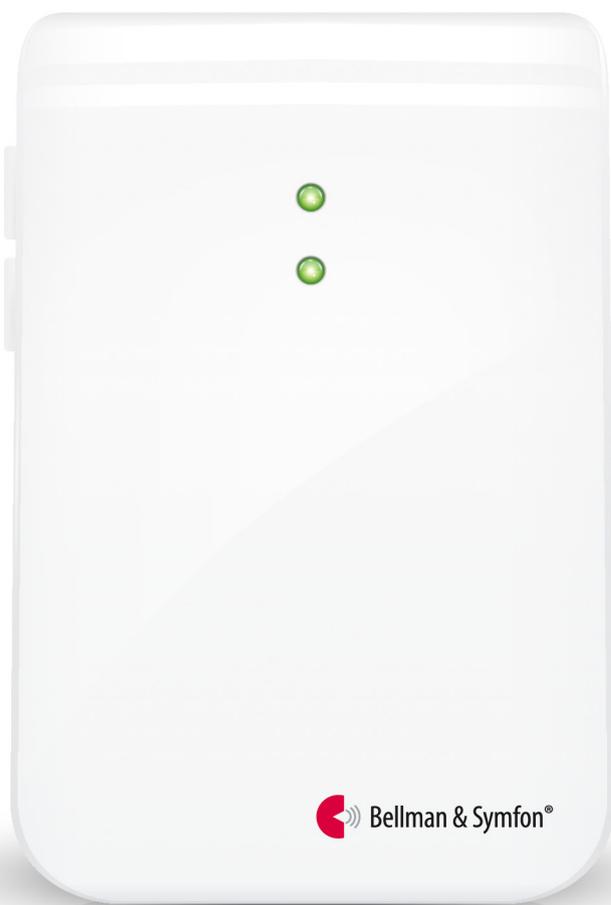

 Bellman & Symfon®



Eigenschaften

Zuverlässige Übertragung
Bis zu 200 m Reichweite

Flexibel
Einstellbare Empfindlichkeit und Verzögerung

Anpassbare Benachrichtigung
Verwenden Sie ein eigenes Signal für jedes Kind

Optionale Kontaktmatte
Wissen wenn Ihr Kind das Bett verlässt

Einfach zu bedienen
Keine komplizierten Menüs

Seien Sie für Ihr Baby da

Die Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit Ihres Babys ist eines der wichtigsten Dinge, die Sie als Eltern tragen. Bellman & Symfon bietet eine vollständig sichere Babyruf-Lösung für Eltern mit Hörverlust. Der Visit Babyruf-Sender informiert Sie sobald Ihr Baby Sie braucht, auch wenn Sie schlafen oder ein paar Zimmer entfernt sind.

Wie es funktioniert

Wenn der Visit Babyruf-Sender aktiviert wird, signalisiert er dies Ihren Visit Empfängern - diese benachrichtigen Sie mit Tönen, Lichtblitzen oder Vibrationen (je nach Empfänger).

Sicher und zuverlässig

Visit nutzt eine sichere Funkverbindung die das gesamte Haus abdeckt, sodass Sie immer informiert sind.

Einstellbare Empfindlichkeit und Verzögerung

Sie können die Empfindlichkeit und Verzögerung des Babyruf-Senders stufenweise nach Ihren Anforderungen einstellen.

Anpassbare Benachrichtigung

Wenn Sie mehr als ein Kind haben, können Sie verschiedene Signale wählen, sodass Sie wissen welches Ihre Aufmerksamkeit braucht.



Technische Daten



Abmessungen und Gewicht

- Höhe: **4.0", 100 mm**
 Breite: **2.6", 65 mm**
 Tiefe: **1.1", 27 mm**
 Gewicht: **4.2 Unzen, 120 g inkl. Batterien**



Ein-/ Ausgänge

- 3.5 mm externer Trigger Eingang

Aktivierung

- Die Test Tasten und die internen Mikrofone
- Die Kontaktmatte (Zubehör)

Einstellungen

- Empfindlichkeit: Hoch, Mittel, Niedrig
- Verzögerung: 30 Sek, 10 Sek, 1 Sek

Frequenz und Reichweite


- Funkfrequenz: 315 MHz, 433.92 MHz oder 868.3 MHz, je nach Region
- Reichweite: 50 - 200 m, je nach der Funkfrequenz und Gebäudemerkmalen

Einsatzbereich

- Nur für den Innenbereich
- Temperatur: 59° bis 95° F (15° - 35° C)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% - 95% (nicht kondensierend)

Tasten und Anschlüsse

Test/Einstellungs-Tasten LED-Leuchte Ext. Trigger Eingang Mikrofone

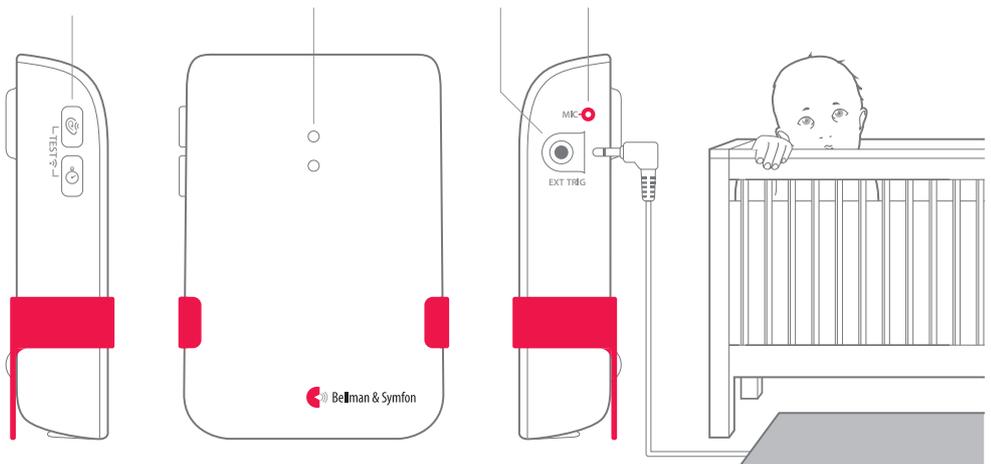

! Hinweis! Stellen Sie sicher, dass sich der Babyruf-Sender außerhalb der Reichweite des Kindes befindet. Stellen Sie den Babyruf-Sender niemals in die Wiege oder den Kinderlaufstall des Kindes.

Stromversorgung und Batterie

- Stromversorgung
Batteriebetrieb 2 x 1.5 V AA Lithium oder Alkali
- Stromverbrauch
Aktiv <30 mA, Leerlauf <150 µA
- Betriebszeit
Alkali ~ 6 Monate, Lithium ~ 1 Jahr

Anzahl der Funkschlüssel

- 64 als Standard. Bis zu 256 mit optionaler Software.

Wartung und Reinigung

- Wartungsfrei. Reinigen mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger, Sprays, Lösungsmittel, Alkohol oder Scheuermittel.
- Nicht für die Wiederverwendung durch andere Personen vorgesehen.

Regulatorische Anforderungen

- Entspricht den folgenden Anforderungen: WEEE, Der Grüne Punkt, CE, RoHS, C-tick, A-Tick



Lieferumfang

- BE1491 Babyruf-Sender
- Standfuß
- 2 x 1.5V AA Alkali-Batterien
- Reinigungstuch
- Schraube und Dübel
- Bedienungsanleitung



Zubehör

Folgendes Zubehör ist verfügbar:

- BE9024 Kontaktmatte

© und TM-2014 Bellman & Symfon AB

Bellman und Bellman & Symfon sind eingetragene Marken von Bellman & Symfon AB, alle Rechte vorbehalten. Alle Produkt-Designs sind patentiert. Diese Broschüre kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE1431_001DAS001_DE

bellman.com